


Lansinoh®

# Latch Assist™

## Erleichtert das Anlegen des Babys

- Für stillende Mütter, deren Brüste sich nach dem Milcheinschuss vergrößern und spannen
- Zieht die Brustwarze sanft hervor, um sie im Moment des Anlegens in die richtige Form und Position zu bringen
- Auch zur vorübergehenden Korrektur von flachen oder eingezogenen Brustwarzen

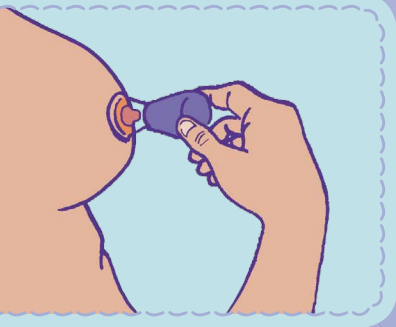

Der praktische Stillhelfer

Lansinoh®


# Latch Assist™

## Erleichtert das Anlegen des Babys

In den ersten Tagen nach der Geburt erleben viele Mütter ein plötzliches, sehr starkes Anschwellen der Brust in Folge des Milcheinschusses. Die Brustwarze ist dadurch nahezu flach und für das Baby kaum zu erfassen. Dieser vorübergehende Zustand kann das Stillen kurzzeitig sehr erschweren. Wird nicht ausreichend viel Brust erfasst, kann sich kein optimaler Milchfluss einstellen, zudem besteht die Gefahr wunder Brustwarzen.

Der Latch Assist™ ist eine einfache Stillhilfe, um die Brustwarze sanft hervorzuziehen und in Form zu bringen.

- **Klein und diskret für eine einfache Handhabung** – schneller und komfortabler als die Benutzung einer Milchpumpe zum gleichen Zweck
- **Aus sicheren, unzerbrechlichen Materialien**  
Trichter aus Polypropylen, Ball aus Silikon
- **Handlich in einer hygienischen Dose verpackt** – perfekt für unterwegs
- **Einfache Reinigung** – Auskochen oder Dampfsterilisieren  
*Falls Milch in den Silikonball gelangt, muss diese verworfen werden.*  
*Hinweis für Krankenhäuser: Sterilisation im Autoklav möglich*
- **Zwei Trichtergrößen in jeder Packung**

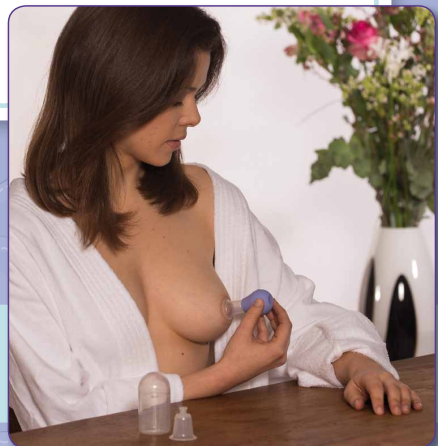

[www.lansinoh.de](http://www.lansinoh.de)