



Lansinoh®

# Muttermilchauffänger



Stillexperten seit über 30 Jahren

# Keine wertvolle Muttermilch verschwenden: **Der Lansinoh® Muttermilchauffänger**

- **Sicherer Sitz ohne Festhalten**
- **Passend für alle Brustgrößen**
- **Kein Verschütten dank Saugfuß und Umhängeband**
- **Spülmaschinengeeignet im oberen Geschirrkorb**
- **Geeignet für die Sterilisation in der Mikrowelle, im Mikrowellen-Sterilisationsbeutel und im Sterilisator**

Während die Mutter auf der einen Seite stillt oder abpumpt, kann es passieren, dass aus der anderen Brust Muttermilch fließt. Dieser Verlust muss nicht sein. Der Lansinoh® Muttermilchauffänger sitzt durch einen natürlichen Sog sicher an der Brust und sammelt ganz einfach die wertvolle Muttermilch. So kann das Baby jeden kostbaren Tropfen genießen.

Mit seinem angenehmen, extrem weichen Material und seiner Passgenauigkeit für jede Brustgröße ist der Muttermilchauffänger eine praktische Alternative zu Auffangschalen.

**So wird er angewendet:** Der Muttermilchauffänger wird zusammengedrückt und einfach auf die Brust

aufgesetzt – so entsteht ein luftdichtes Vakuum. Sobald der Milchspendereflex ausgelöst ist, wird die Muttermilch aufgefangen. Das Umhängeband verhindert, dass etwas verschüttet wird. Ist der Muttermilchauffänger gefüllt oder das Stillen beziehungsweise Abpumpen beendet, wird er durch leichtes Zusammendrücken von der Brust gelöst. Die gesammelte Muttermilch kann in einen Lansinoh® Muttermilchbeutel oder eine Lansinoh® Muttermilchflasche umgefüllt und aufbewahrt werden.

**Einfache Reinigung:** Der Muttermilchauffänger wird ganz einfach mit heißem Seifenwasser abgewaschen und mit klarem Wasser abgespült. Im oberen Geschirrkorb kann er auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Material: 100 % lebensmittelechtes Silikon

<b>Art.-Nr.</b>	50710
<b>Art.-Bezeichnung</b>	Lansinoh® Muttermilchauffänger
<b>Produkt-EAN</b>	506 042 023 1120
<b>Inhalt</b>	1 Muttermilchauffänger, Umhängeband und Schutzkappe
<b>Maße Verkaufseinheit (B x H x T)</b>	100 x 165 x 90 mm
<b>Gewicht Verkaufseinheit</b>	166 g
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	12,99 €
<b>Versandeinheit</b>	6



PZN 15394855

Lansinoh Laboratories Inc., Niederlassung Deutschland | Bayerischer Platz 1 | D-10779 Berlin | Sitz: Berlin | Tel.: +49 (0)30 21 96 162 0 | Fax: +49 (0)30 21 96 162 10  
 info@lansinoh.de | www.lansinoh.de | Amtsgericht Charlottenburg | HRB-Nr.: 107001B | USt-IdNr.: DE238257638 | Hauptsitz: Lansinoh Laboratories Inc. | Alexandria, Virginia, USA | EIN 62-1382004 | CEO Kevin Vyse-Peacock